


OVERALL SIZE: 26.534" WIDE X 1.811" HIGH

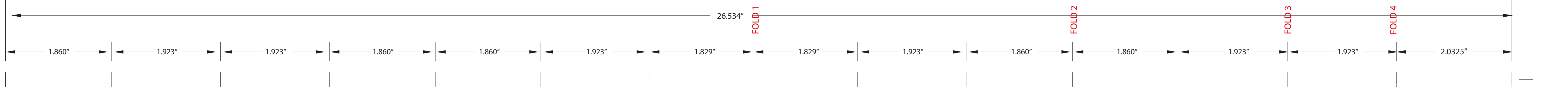

Nota: Si un lente de contacto resulta claramente incómodo al aplicarlo o se vuelve menos cómodo que cuando lo utilizó por primera vez, remuévalo inmediatamente y póngase en contacto con su profesional de la visión. Si el examen de sus ojos y los lentes de contacto muestra cualquier otro problema, RETIRE INMEDIATAMENTE LOS LENTES DE CONTACTO Y Póngase EN CONTACTO CON EL PROFESIONAL DE LA VISIÓN.

Para 5. Control del lente de contacto. Un lente de contacto que está sobre la córnea (parte central del ojo), muy raramente se moverá a la parte blanca del ojo durante su uso. No obstante, es algo que puede ocurrir si la colocación y la retirada no se realizan correctamente. Para centrar un lente de contacto, siga cualquiera de estos procedimientos:
• Coloque los párpados y masajee suavemente el lente de contacto a través del párpado cerrado para llevarlo hasta la lagrimal.
• Después suavemente el lente de contacto descolado hasta la córnea (centro del ojo) mientras tiene el ojo abierto, aplicando presión con el dedo sobre el borde del párpado superior o inferior.

USO DEL LENTE DE CONTACTO
Tenga en cuenta las siguientes precauciones importantes mientras lleva los lentes de contacto puestos:
Condiciones peligrosas

• Si utiliza productos en aerosol (opra), como la laca para el cabello, mientras usa lentes de contacto, mantenga los ojos cerrados hasta que el spray se haya borrado.
• Evite todos los humos y vapores nocivos o irritantes mientras lleva lentes de contacto.
• Nunca enjuague los lentes de contacto con agua corriente del grifo. El agua corriente contiene muchas impurezas que pueden contaminar o dañar sus lentes de contacto y provocar una infección o lesión ocular.

Actividad acuática
• No ponga los lentes de contacto al agua mientras los utiliza.
ADVERTENCIA:
El agua puede contener microorganismos que pueden provocar una infección grave, pérdida de visión o ceguera. Si sus lentes de contacto se han sumergido en agua o se realizan deportes acuáticos o si nadar en piscinas, jacuzzis, lagos o ríos, debe desenterrarlos y reemplazarlos por un par nuevo. Póngase en contacto con su profesional de la visión para obtener recomendaciones de relación con el uso de lentes de contacto cuando se realiza cualquier actividad que implique contacto con el agua.

Soluciones lubricantes o humectantes
• Su profesional de la visión puede recomendar una solución lubricante o humectante. Estas soluciones pueden utilizarse para humedecer (lubricar) sus lentes de contacto mientras los usa.
• No utilice saliva humana que sus ojos las soluciones recomendadas para lubricar o humedecer sus lentes de contacto. No ponga los lentes de contacto en su boca.

Método de pelizar:
Paso 1. Mire hacia arriba y deslice el lente de contacto hacia abajo hasta la parte inferior del ojo utilizando el dedo índice.
Paso 2. Píese suavemente el lente de contacto entre el dedo pulgar y el índice.
Paso 3. Mire a la parte inferior del lente de contacto.

INMEDIATAMENTE CON AGUA DEL GRIFO Y PÓNGASE EN CONTACTO CON SU PROFESIONAL DE LA VISIÓN O ACUDA A LA SALA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL.

• NOTIFICACIÓN DE REACCIONES ADVERSAS (Efectos secundarios)
Cualquier incidente experimentado mientras se llevan lentes de contacto de marca ACUVUE debe notificarse al fabricante y/o su representante autorizado y/o su autoridad nacional.


Fecha de revisión: 02/2024
VEVA 7/2024/BAEUS
VEVA 7/2024/BA193

En las etiquetas o cajas pueden aparecer los siguientes símbolos:
Indica un sistema único de barrera estéril
Filtro ultravioleta
Representante Autorizado en la Comunidad Europea
Marcado europeo y número de identificación de organismo notificado
Lentes de Contacto
DIA Diámetro
BC Curva base
D Dioptrías (potencia del lente de contacto)
AOKL Cirugía
Diseño
Orientación Correcta del lente de contacto
Orientación Incorrecta del lente de contacto (Lente de contacto al revés)
Apertura del empaque (blister)

Indica un sistema único de barrera estéril
Filtro ultravioleta
Representante Autorizado en la Comunidad Europea
Marcado europeo y número de identificación de organismo notificado
Lentes de Contacto
DIA Diámetro
BC Curva base
D Dioptrías (potencia del lente de contacto)
AOKL Cirugía
Diseño
Orientación Correcta del lente de contacto
Orientación Incorrecta del lente de contacto (Lente de contacto al revés)
Apertura del empaque (blister)

Indica un sistema único de barrera estéril
Filtro ultravioleta
Representante Autorizado en la Comunidad Europea
Marcado europeo y número de identificación de organismo notificado
Lentes de Contacto
DIA Diámetro
BC Curva base
D Dioptrías (potencia del lente de contacto)
AOKL Cirugía
Diseño
Orientación Correcta del lente de contacto
Orientación Incorrecta del lente de contacto (Lente de contacto al revés)
Apertura del empaque (blister)

Indica un sistema único de barrera estéril
Filtro ultravioleta
Representante Autorizado en la Comunidad Europea
Marcado europeo y número de identificación de organismo notificado
Lentes de Contacto
DIA Diámetro
BC Curva base
D Dioptrías (potencia del lente de contacto)
AOKL Cirugía
Diseño
Orientación Correcta del lente de contacto
Orientación Incorrecta del lente de contacto (Lente de contacto al revés)
Apertura del empaque (blister)

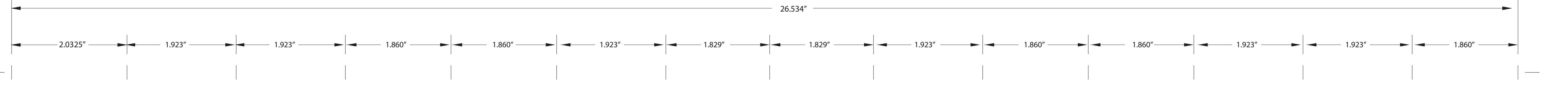

Johnson & Johnson de Chile S.A. Cero Colorado #2640 Piso 9, Torre 1, Las Condes Santiago, Chile.
Contactos: Argentina: +800-444-2604 - contactos.ar@acuvue.com
Chile: +56-23-284-0501 - contactos.cl@acuvue.com
Colombia: +57-300-510-4094 - contactos.col@acuvue.com
Costa Rica: +506-2214-8951 - contactos.cr@acuvue.com
Ecuador: +593-9-2716-4000 - contactos.ec@acuvue.com
España: +34-91-2716-4000 - contactos.es@acuvue.com
Estados Unidos: +1-800-527-9900 - contactos.us@acuvue.com
Francia: +33-1-4016-1111 - contactos.fr@acuvue.com
Alemania: +49-911-2438-6666 - contactos.de@acuvue.com
Italia: +39-051-5198-4659 - contactos.it@acuvue.com
México: +52-55-5752-2222 - contactos.mx@acuvue.com
Perú: +51-1-881-6666 - contactos.pe@acuvue.com
Reino Unido: +44-203-456-6666 - contactos.uk@acuvue.com

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y USO INDICADO
ACUVUE OASYS 1-DAY con HydrALux™ están indicados en el uso único y reemplazo diario para la corrección óptica de errores refractivos, miopía e hipermetropía, en personas con ojos sanos que tengan hasta 1,0 D de astigmatismo.
NO UTILICE LOS LENTES DE CONTACTO MIENTRAS DUEME.
Cuando usa lentes de contacto para corrección visual, NO UTILICE estos lentes de contacto si presenta alguna de las siguientes afecciones:
• Infección o irritación en o alrededor de los ojos o los párpados.
• Algunas enfermedades, tales como la diabetes o la cirugía, conllevan un riesgo aumentado que el riesgo de problemas oculares en personas que utilizan lentes de contacto es mayor entre los fumadores que entre los no fumadores.
• Los problemas con los lentes de contacto o los productos para su cuidado pueden ocasionar lesiones oculares graves.
• Si su uso o cuidado inadecuados de lentes de contacto, y sus productos son esenciales para el uso seguro de estos productos.
• El riesgo general de problemas oculares serios puede reducirse si se siguen cuidadosamente las instrucciones para el uso y desecho de lentes de contacto.
• Evite usar lentes de contacto con medicamentos, tales como antibióticos, descongestionantes, diuréticos, relajantes musculares, transgénicos o sus tratamientos que presionen el mero, pueden causar sequedad ocular, mayor sensación de frotar lentes de contacto (sensación del lente de contacto en el ojo) o visión borrosa. Informe siempre a su profesional de la visión si tiene algún problema con sus lentes de contacto mientras toma estos medicamentos.

relición ultravioleta. Sin embargo, no se ha realizado estudios clínicos que demuestren que llevar lentes de contacto con protección ultravioleta-UV reduce el riesgo de desarrollar cataratas o otros problemas oculares. Para obtener más información, consulte a su profesional de la visión.
Su profesional de la visión determinará su esquema de uso (cuanto tiempo usted debería utilizar los lentes de contacto cada día). Cuando se prescriben para uso único y reemplazo diario, los lentes de contacto deben ser descartados luego de ser removidos.
2. CONTRAINDICACIONES (¿Cuáles no se deben utilizar?)
• NO UTILICE estos lentes de contacto si presenta alguna de las siguientes afecciones:
• INFLAMACIÓN O irritación en o alrededor de los ojos o los párpados.
• Algunas enfermedades, tales como la diabetes o la cirugía, conllevan un riesgo aumentado que el riesgo de problemas oculares en personas que utilizan lentes de contacto es mayor entre los fumadores que entre los no fumadores.
• Los problemas con los lentes de contacto o los productos para su cuidado pueden ocasionar lesiones oculares graves.
• Si su uso o cuidado inadecuados de lentes de contacto, y sus productos son esenciales para el uso seguro de estos productos.
• El riesgo general de problemas oculares serios puede reducirse si se siguen cuidadosamente las instrucciones para el uso y desecho de lentes de contacto.
• Evite usar lentes de contacto con medicamentos, tales como antibióticos, descongestionantes, diuréticos, relajantes musculares, transgénicos o sus tratamientos que presionen el mero, pueden causar sequedad ocular, mayor sensación de frotar lentes de contacto (sensación del lente de contacto en el ojo) o visión borrosa. Informe siempre a su profesional de la visión si tiene algún problema con sus lentes de contacto mientras toma estos medicamentos.

4. PRECAUCIONES
• Nunca utilice pinzas u otros herramientas para sacar sus lentes de contacto del emvasivBlister.
• No cambie su tipo de lente de contacto (por ejemplo, nombre de la marca, etc.) ni los parámetros (por ejemplo, diámetro, curva base, potencia del lente de contacto, etc.) sin consultar a su profesional de la visión.
• Si usa lentes de contacto para corregir la presbicia es posible que no pueda conseguir la mejor agudeza visual completa para la visión lejana o cercana. Las necesidades visuales varían para cada persona, por lo que es importante que consulte con su profesional de la visión sobre el programa de seguimiento recomendado.
• Tenga en cuenta que si utiliza anticoncepción orales (píldoras anticonceptivas), podría desarrollar cambios en la visión o en la comodidad al usar lentes de contacto.
• Si siente cualquier problema de contacto, antes de abandonar la consulta del profesional de la visión, asegurese de que es capaz de colocarse y quitarse los lentes de contacto lo que cuenta con alguien que pueda hacerlo por usted.
• Tenga en cuenta que si utiliza anticoncepción orales (píldoras anticonceptivas), podría desarrollar cambios en la visión o en la comodidad al usar lentes de contacto.
• Si siente cualquier problema de contacto, antes de abandonar la consulta del profesional de la visión, asegurese de que es capaz de colocarse y quitarse los lentes de contacto lo que cuenta con alguien que pueda hacerlo por usted.
• Tenga en cuenta que si utiliza anticoncepción orales (píldoras anticonceptivas), podría desarrollar cambios en la visión o en la comodidad al usar lentes de contacto.
• Si siente cualquier problema de contacto, antes de abandonar la consulta del profesional de la visión, asegurese de que es capaz de colocarse y quitarse los lentes de contacto lo que cuenta con alguien que pueda hacerlo por usted.
• Tenga en cuenta que si utiliza anticoncepción orales (píldoras anticonceptivas), podría desarrollar cambios en la visión o en la comodidad al usar lentes de contacto.
• Si siente cualquier problema de contacto, antes de abandonar la consulta del profesional de la visión, asegurese de que es capaz de colocarse y quitarse los lentes de contacto lo que cuenta con alguien que pueda hacerlo por usted.

DEBE EVITAR EL USO DE bámbones que contengan cremas de limpieza, lociones o acondicionadores de cabello al manipular sus lentes de contacto. Estas sustancias pueden entrar en contacto con los lentes de contacto e interferir con su uso correcto. Es mejor colocarse los lentes de contacto usando un maquinillero.
• Evite el uso de jabones.
• Evite el uso de aceites para el cabello.
• Evite el uso de maquillaje.
• Evite el uso de productos de belleza.
• Evite el uso de productos de cuidado personal.
• Evite el uso de productos de higiene personal.
• Evite el uso de productos de cuidado personal.
• Evite el uso de productos de higiene personal.

MUNCA utilice pinzas u otros herramientas para sacar los lentes de contacto de su emvasivBlister. A veces, es posible que un lente de contacto se pegue al interior de la bolsa al abrir o al propio emvasivBlister de plástico. Esto no es una emergencia. Si los bordes del lente de contacto están fuera de la bolsa, retire el lente de contacto y deseche el lente de contacto. Si el borde del lente de contacto está fuera de la bolsa, retire el lente de contacto y deseche el lente de contacto. Si el borde del lente de contacto está fuera de la bolsa, retire el lente de contacto y deseche el lente de contacto. Si el borde del lente de contacto está fuera de la bolsa, retire el lente de contacto y deseche el lente de contacto. Si el borde del lente de contacto está fuera de la bolsa, retire el lente de contacto y deseche el lente de contacto.

